

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

- Nikdy nepřehýbejte podložku směrem ven – mohlo by dojít k poškození světelného panelu.
- Při akutním poranění nebo traumatu se vždy nejprve poraďte s veterinářem. V případě pochybností se vždy poraďte s lékařem.
- Nenechávejte zařízení zapnuté déle než 15 minut v kuse. Pokud chcete ošetřovat více částí těla po sobě nebo použít podložku opakovaně, vypněte zařízení alespoň na 5 minut. Tím zabráníte přehřátí zařízení.
- Nedívejte se přímo do světla. Doporučuje se používat ochranné brýle. Nepoužívejte v blízkosti očí.
- Podložku / laser CellKick NESMÍ používat děti mladší 13 let ani těhotné ženy.
- Podložku / laser CellKick NESMÍ používat břeží zvířata.
- Podložku / laser CellKick NESMÍ používat při boulicích nebo útvarch neznámého původu.
- Nepoužívejte Podložku / laser CellKick při výskytu rakoviny.
- Baterii, akumulátor ani světelnou podložku nikdy nevystavujte vodě, nečistotám ani jiným kapalinám.
- Nechte zvíře, aby si nejprve na produkt zvyklo, než jej definitivně upevníte.
- Používejte produkty CellKick pouze na čistém a suchém povrchu.
- Nepřikrývejte podložku během používání.
- Vždy zůstaňte v blízkosti zvířete během používání produktu.
- Neomotávejte produkt kolem očí zvířete.
- Používejte pouze originální baterii a nabíječku CellKick.
- Teplota podložky se může mírně zvýšit – nesmí se však zahřívát.
- Světelné pásy jsou křehké – nestoupejte na ně a nezatěžujte je.
- Po použití vše odpojte a bezpečně uložte na suchém místě.
- Baterie je citlivá na chlad – skladujte při pokojové teplotě.
- Odstraňování chlupů a nečistot prodlužuje životnost produktu.
- Světelné pásy lze vyjmout, látkový obal lze čistit vlhkým hadříkem.
- Podložku nelze prát v pračce ani sušit v sušičce.
- Světelné pásy nikdy neohýbejte ani pevně nesvíjejte.
- Nepoužívejte podložku během nabíjení.

*Gratulujeme k nákupu vašeho produktu CellKick pro světelnou terapii!
Před zahájením používání si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.*

Chcete-li vědět, jak nejlépe používat produkty CellKick, navštivte webové stránky www.cellkick.cz pro demonstrační videa.

Co je terapie červeným světlem?

Terapie červeným světlem je neinvazivní podpůrná metoda zaměřená na komfort, regeneraci a celkovou pohodu u koní, psů i lidí. Jedná se o pokročilou formu terapie, při které se specifické světlo používá k stimulaci samoléčebné schopnosti těla a akupunkturních bodů.

Jak to funguje?

Červené světlo z podložky CellKick je absorbováno tělem při specifických vlnových délkách. Buňky pak vytvářejí více mitochondrií, které produkují ATP, čímž podporují různé regenerační procesy, například tvorbu kolagenu a elastinu.

Vlnové délky CellKick Kamaše Ultimate

Naše podložka na nohu má 2 různé vlnové délky: 660 nm a 850 nm. Jednou z vlnových délek červeného světla, která má nejvíce vědecky prokázaných přínosů, je 660 nm. Infračervená vlnová délka, u níž bylo vědecky prokázáno, že přináší přínosy pro lidi, je 850 nm. Červené světlo vyzařované s vlnovou délkou 660 nm je absorbováno ve vrstvách kůže a v tkáňově stimulačních spouštěcích a akupunkturních bodech a navíc poskytuje významné buněčné přínosy v horních vrstvách kůže, což jej činí vhodným při kožních onemocněních. Tato vlnová délka je nejvhodnější pro léčbu ran a infekcí. Světlo vyzařované při 850 nm se nazývá blízké infračervené světlo. Toto světlo není viditelné lidským okem. Blízké infračervené světlo proniká hlouběji do těla a používá se k léčbě svalů, šlach, vazů, kostí a kloubů.

Balení CellKick Kamaše Ultimate obsahuje:

- 1 podložku CellKick Kamaše Ultimate
- 1 samostatnou baterii
- 1 nabíječku
- 1 rok záruky
- Uživatelskou příručku

Specifikace produktu:


- Výkon: 6 Watt
- Spektrum: 660 nm a 850 nm
- Napětí: 12 V
- Hustota: 77,78 mW/cm²
- Rozměry: v 49 cm × š 32 cm

Instrukce

- Vyjměte podložku na nohu z obalu a rozpojte suché zipy.
- Při používání podložky vždy berte ohled na chování zvířete. Nechte zvíře, aby se s podložkou nejprve seznámilo, než ji nasadíte. Nejprve očistěte ošetřovanou oblast. Voda a nečistoty jsou pro podložku velmi škodlivé a mohou výrazně zkrátit její životnost. Umístěte vnitřní stranu, kde se nachází světelný paprsek, k noze a „obtočte“ podložku kolem nohy. Podložku Ultimate lze připevnit jak na přední, tak na zadní nohu.
- Suché zipy lze připevnit po celé ploše podložky pro dokonalé přizpůsobení. Nejprve doporučujeme upevnit střední suchý zip a poté spodní a horní. Podložka musí přiléhat k noze, ale nikdy nesmí být příliš těsná nebo škrtit. Pokud lze mezi podložku a nohu koně vložit alespoň jeden prst, podložka sedí správně. Samozřejmě podložka nesmí být ani volná. Tímto způsobem se snižuje riziko sklouznutí s veškerými následky. U některých koní může být podložka Ultimate příliš dlouhá. Horní suchý zip nechte trochu volnější, aby byla při zvednutí nohy k dispozici malá rezerva.
- Pokud je podložka správně upevněna, lze na ni umístit samostatnou baterii se suchým zipem na zadní straně. Díky suchému zipu si můžete sami zvolit místo, kde bude baterie nejvhodněji upevněna. Doporučujeme ji umístit na vnější stranu, aby se zabránilo nárazu od druhé nohy.
- Pokud je baterie správně upevněna, můžete ji připojit ke kabelu baterie, který je součástí podložky.
- Je sezení ukončeno? Nejprve odpojte kabely. Poté opatrně vyjměte baterii (pozor, zvíře se může tohoto zvuku leknout, zejména pokud je velmi uvolněné). Po vyjmutí baterie sundejte celou podložku.
- Podložku s baterií vždy pečlivě skladujte, ale nikdy ji (pevně) nerolujte ani neskládejte. Podložka i baterie zůstávají kvůli světelnému paprsku křehkými produkty. Dbejte na to, aby podložka nebyla skladována vlhká nebo znečištěná.

Nastavení baterie

Na displeji baterie se zobrazuje doba terapie, intenzita terapie, kapacita baterie a indikace nabíjení.

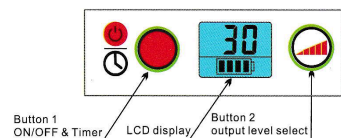

Button 1: Zapnutí/vypnutí a volba doby terapie

Pro zapnutí baterie podržte tlačítko 1 po dobu 1–2 sekund. Vestavěné hodiny se spustí, na LCD displeji uvidíte zbývající dobu terapie a kapacitu baterie.

Pro volbu doby terapie krátce stiskněte tlačítko 1, LCD displej zobrazí čas zvolený uživatelem. Naše doporučení je 15 minut na jedno ošetření.

Po 2 sekundách se LCD displej vrátí k zobrazení zbývající doby terapie a kapacity baterie.

„L4“ znamená 100 % intenzity

„L3“ znamená 75 % intenzity


„L2“ znamená 50 % intenzity



„L1“ znamená 25 % intenzity

Naše doporučení je používat 100% intenzitu, pokud zvíře jasně nedává najevo, že je mu to nepříjemné. Může se stát, že tělo je tak zaměstnáno regenerací, že se zdá teplejší, než podložka ve skutečnosti je; v takovém případě můžete intenzitu snížit. Jakmile proces hojení dále postupuje, můžete intenzitu opět zvýšit.

Po 2 sekundách se LCD displej vrátí k zobrazení zbývající doby terapie a kapacity baterie.

Nabíjení

Kapacita baterie je uvedena na LCD displeji baterie. Symbol kapacity baterie  je vždy zobrazen při zapnutí.

Displej nabíjení: pokud je ovladač ve stavu nabíjení, symbol bliká . Jakmile je nabíjení dokončeno, symbol přestane blikat. 

Nabíjení lze provádět připojením nabíječky k nabíjecímu kabelu baterie. Nikdy nepoužívejte jinou nabíječku než tu, která je dodána se sadou. Pozor: nikdy nepřipojujte nabíječku přímo k podložce a nikdy nepoužívejte podložku/baterii během současného nabíjení.

Přebíání a zkrat

Pokud je napětí baterie během nabíjení > 12,6 V, aktivuje se ochrana proti přebíání. Baterie se přestane nabíjet a symbol baterie přestane blikat.

Pokud je napětí baterie během používání < 9,6 V, baterie se po několikanásobném bliknutí LCD displeje vypne.

Pokud by během používání došlo ke zkratu, baterie se okamžitě vypne, aby se zabránilo poškození zařízení.

Pro obecné použití

Podložku / laser CellKick lze také úspěšně používat při kožních onemocněních, jizvách, hojení ran, natržených vazech, šlachách, lokální bolesti a podobně. Připevněte podložku na ošetřované místo po dobu 10 minut. Pro optimální výsledek provádějte toto ošetření 3x denně.