

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

- Nikdy nepřehýbejte podložku směrem ven – mohlo by dojít k poškození světelného panelu.
- Při akutním poranění nebo traumatu se vždy nejprve poraďte s veterinářem. V případě pochybností se vždy poraďte s lékařem.
- Nenechávejte zařízení zapnuté déle než 15 minut v kuse. Pokud chcete ošetřovat více částí těla po sobě nebo použít podložku opakovaně, vypněte zařízení alespoň na 5 minut. Tím zabráníte přehřátí zařízení.
- Nedívejte se přímo do světla. Doporučuje se používat ochranné brýle. Nepoužívejte v blízkosti očí.
- Podložku / laser CellKick NESMÍ používat děti mladší 13 let ani těhotné ženy.
- Podložku / laser CellKick NESMÍ používat březi zvířata.
- Podložku / laser CellKick NESMÍ používat při boulich nebo útvarch neznámého původu.
- Nepoužívejte Podložku / laser CellKick při výskytu rakoviny.
- Baterii, akumulátor ani světelnou podložku nikdy nevystavujte vodě, nečistotám ani jiným kapalinám.
- Nechte zvíře, aby si nejprve na produkt zvyklo, než jej definitivně upevníte.
- Používejte produkty CellKick pouze na čistém a suchém povrchu.
- Nepřikrývejte podložku během používání.
- Vždy zůstaňte v blízkosti zvířete během používání produktu.
- Neomotávejte produkt kolem očí zvířete.
- Používejte pouze originální baterii a nabíječku CellKick.
- Teplota podložky se může mírně zvýšit – nesmí se však zahřívát.
- Světelné pásy jsou křehké – nestoupejte na ně a nezatěžujte je.
- Po použití vše odpojte a bezpečně uložte na suchém místě.
- Baterie je citlivá na chlad – skladujte při pokojové teplotě.
- Odstraňování chlupů a nečistot prodlužuje životnost produktu.
- Světelné pásy lze vyjmout, látkový obal lze čistit vlhkým hadříkem.
- Podložku nelze prát v pračce ani sušit v sušičce.
- Světelné pásy nikdy neohýbejte ani pevně nesvíjejte.
- Nepoužívejte podložku během nabíjení.

*Gratulujeme k nákupu vašeho produktu CellKick pro světelnou terapii!  
Před zahájením používání si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.*

Chcete-li vědět, jak nejlépe používat produkty CellKick, navštivte webové stránky [www.cellkick.cz](http://www.cellkick.cz) pro demonstrační videa.

## Jak to funguje?

Červené světlo kopytní podložky CellKick je tělem absorbováno při určitých vlnových délkách. Jakmile je červené světlo tělem absorbováno, buňky začnou vytvářet více mitochondrií, které následně produkují ATP. Tyto buňky získávají vysokou energetickou kapacitu, kterou využívají k nejrůznějším (regeneračním) procesům, jako je například produkce kolagenu a elastinu. Červené světlo proniká hluboko do vrstev kůže a tkání a obnovuje, opravuje, regeneruje a hojí vzniklá poškození. Pomáhá zmírňovat bolest a snižovat záněty.

## Vlnové délky CellKick Kopytního Padu

Naše kopytní podložka má 2 různé vlnové délky, konkrétně: 660 nm a 850 nm. Jednou z vlnových délek červeného světla s nejvíce vědecky prokázanými přínosy je 660 nm. Infračervená vlnová délka, u které bylo vědecky prokázáno, že přináší přínosy pro lidi, je 850 nm. Červené světlo vyzařované s vlnovou délkou 660 nm je absorbováno ve vrstvách kůže a v tkáňově stimulačních spouštěcích a akupunkturních bodech a navíc přináší výrazné buněčné výhody v horní oblasti kůže, což jej činí vhodným při kožních onemocněních. Tato vlnová délka je nejhodnější pro léčbu ran a infekcí. Světlo vyzařované na 850 nm se nazývá blízké infračervené světlo. Toto světlo není viditelné lidským okem. Blízké infračervené světlo proniká hlouběji do těla a používá se k léčbě svalů, šlach, vazů, kostí a kloubů.

## Balení CellKick Kopytního Padu obsahuje následující:

- 1 kopytní pad CellKick
- 1 samostatnou baterii
- 1 nabíječku
- 1 rok záruky
- Uživatelskou příručku

## Specifikace produktu:


- Výkon: 3 Watt
- Spektrum: 660 nm a 850 nm
- Napětí: 12 V
- Hustota: 77,78 mW/cm<sup>2</sup>
- Rozměry: v 11 cm × š 39,50 cm
- Rozměry pracovní plochy: v 8 cm × š 28 cm

## Pokyny

- Vyjměte kopytní pad z obalu a rozepte suchý zip.
  - Při používání podložky vždy berte ohled na chování zvířete. Nechte zvíře, aby se s podložkou nejprve seznámilo, než ji nasadíte. Nejprve očistěte ošetřovanou oblast. Voda a nečistoty jsou pro podložku velmi škodlivé a mohou výrazně zkrátit její životnost.
- Umístěte vnitřní stranu, kde se nachází světelný paprsek, ke kopytu a podložku kolem kopyta „obtočte“.
- Suchý zip lze připevnit po celé ploše podložky pro dokonalé přizpůsobení. Podložka musí ke kopytu přiléhat, ale nikdy nesmí být nasazena příliš těsně.
  - Pokud je podložka správně upevněna, lze na ni umístit samostatnou baterii se suchým zipem na zadní straně. Díky suchému zipu si můžete sami zvolit místo, kde bude baterie nejvhodněji připevněna.
  - Pokud je baterie správně upevněna, můžete ji připojit ke kabelu baterie, který je součástí podložky. Jakmile kabely spojíte, červené světlo se okamžitě rozsvítí. Délku aplikace si sledujte sami.
  - Je sezení ukončeno? Nejprve odpojte kabely. Poté opatrně vyjměte baterii (pozor, zvíře se může tohoto zvuku leknot, zejména pokud je velmi uvolněné). Po vyjmutí baterie sundejte celou podložku.
  - Podložku s baterií vždy pečlivě skladujte, ale nikdy ji (pevně) nerolujte ani neskládejte. Podložka i baterie zůstávají kvůli světelnému paprsku křehkými produkty. Dbejte na to, aby podložka nebyla skladována vlhká nebo znečištěná.

## Nastavení baterie

Na displeji baterie se zobrazuje doba terapie, intenzita terapie, kapacita baterie a indikace nabíjení.

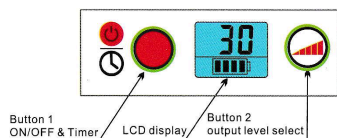

### Button 1: Zapnutí/vypnutí a volba doby terapie

Pro zapnutí baterie podržte tlačítko 1 po dobu 1–2 sekund. Vestavěné hodiny se spustí, na LCD displeji uvidíte zbývající dobu terapie a kapacitu baterie.

Pro volbu doby terapie krátce stiskněte tlačítko 1, LCD displej zobrazí čas zvolený uživatelem. Naše doporučení je 15 minut na jedno ošetření.

Po 2 sekundách se LCD displej vrátí k zobrazení zbývající doby terapie a kapacity baterie.

„L4“ znamená 100 % intenzity

„L3“ znamená 75 % intenzity


„L2“ znamená 50 % intenzity



„L1“ znamená 25 % intenzity

Naše doporučení je používat 100% intenzitu, pokud zvíře jasně nedává najevo, že je mu to nepříjemné. Může se stát, že tělo je tak zaměstnáno regenerací, že se zdá teplejší, než podložka ve skutečnosti je; v takovém případě můžete intenzitu snížit. Jakmile proces hojení dále postupuje, můžete intenzitu opět zvýšit.

Po 2 sekundách se LCD displej vrátí k zobrazení zbývající doby terapie a kapacity baterie.

## Nabíjení

Kapacita baterie je uvedena na LCD displeji baterie. Symbol kapacity baterie  je vždy zobrazen při zapnutí.

Displej nabíjení: pokud je ovladač ve stavu nabíjení, symbol bliká . Jakmile je nabíjení dokončeno, symbol přestane blikat. .

Nabíjení lze provádět připojením nabíječky k nabíjecímu kabelu baterie. Nikdy nepoužívejte jinou nabíječku než tu, která je dodána se sadou. Pozor: nikdy nepřipojujte nabíječku přímo k podložce a nikdy nepoužívejte podložku/baterii během současného nabíjení.

## Přebití a zkrat

Pokud je napětí baterie během nabíjení > 12,6 V, aktivuje se ochrana proti přebití. Baterie se přestane nabíjet a symbol baterie přestane blikat.

Pokud je napětí baterie během používání < 9,6 V, baterie se po několikanásobném bliknutí LCD displeje vypne.

Pokud by během používání došlo ke zkratu, baterie se okamžitě vypne, aby se zabránilo poškození zařízení.

## Pro obecné použití

Podložku / laser CellKick lze také úspěšně používat při kožních onemocněních, jizvách, hojení ran, natržených vazech, šlachách, lokální bolesti a podobně. Připevněte podložku na ošetřované místo po dobu 10 minut. Pro optimální výsledek provádějte toto ošetření 3× denně.