

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

- Nikdy nepřehýbejte podložku směrem ven – mohlo by dojít k poškození světelného panelu.
- Při akutním poranění nebo traumatu se vždy nejprve poraďte s veterinářem. V případě pochybností se vždy poraďte s lékařem.
- Nenechávejte zařízení zapnuté déle než 15 minut v kuse. Pokud chcete ošetřovat více částí těla po sobě nebo použít podložku opakovaně, vypněte zařízení alespoň na 5 minut. Tím zabráníte přehřátí zařízení.
- Nedívejte se přímo do světla. Doporučuje se používat ochranné brýle. Nepoužívejte v blízkosti očí.
- Podložku CellKick pro psy NESMÍ používat děti mladší 13 let ani těhotné ženy.
- Podložku CellKick pro psy NESMÍ používat březí zvířata.
- Podložku CellKick pro psy NESMÍ používat při boulicích nebo útvech neznámého původu.
- Nepoužívejte podložku CellKick při výskytu rakoviny.
- Baterii, akumulátor ani světelnou podložku nikdy nevystavujte vodě, nečistotám ani jiným kapalinám.
- Nechte zvíře, aby si nejprve na produkt zvyklo, než jej definitivně upevníte.
- Používejte produkty CellKick pouze na čistém a suchém povrchu.
- Nepřikrývejte podložku během používání.
- Vždy zůstaňte v blízkosti zvířete během používání produktu.
- Neomotávejte produkt kolem očí zvířete.
- Používejte pouze originální baterii a nabíječku CellKick.
- Teplota podložky se může mírně zvýšit – nesmí se však zahřívát.
- Světelné pásy jsou křehké – nestoupejte na ně a nezatěžujte je.
- Po použití vše odpojte a bezpečně uložte na suchém místě.
- Baterie je citlivá na chlad – skladujte při pokojové teplotě.
- Odstraňování chlupů a nečistot prodlužuje životnost produktu.
- Světelné pásy lze vyjmout, látkový obal lze čistit vlhkým hadříkem.
- Podložku nelze prát v pračce ani sušit v sušičce.
- Světelné pásy nikdy neohýbejte ani pevně nesvíjejte.
- Nepoužívejte podložku během nabíjení.

Gratulujeme k nákupu vašeho produktu CellKick pro světelnou terapii!

Před zahájením používání si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Chcete-li vědět, jak nejlépe používat produkty CellKick, navštivte webové stránky www.cellkick.cz pro demonstrační videa.

Co je terapie červeným světlem?

Terapie červeným světlem je neinvazivní podpůrná metoda zaměřená na komfort, regeneraci a celkovou pohodu u koní, psů i lidí. Jedná se o pokročilou formu terapie, při které se specifické světlo používá k stimulaci samoléčebné schopnosti těla a akupunkturních bodů.

Jak to funguje?

Červené světlo z podložky CellKick je absorbováno tělem při specifických vlnových délkách. Buňky pak vytvářejí více mitochondrií, které produkují ATP, čímž podporují různé regenerační procesy, například tvorbu kolagenu a elastinu.

Vlnové délky podložky CellKick pro psy

Podložka má dvě vlnové délky: 660 nm a 850 nm. 660 nm je ideální pro pokožku, rány a infekce. 850 nm (blízké infračervené světlo) proniká hlouběji a používá se pro svaly, šlachy, kosti a klouby.

Obsah balení:

- 1 CellKick podložka pro psy
- 2 upevňovací pásy
- 1 akumulátor
- 1 nabíječka
- 1 rok záruka
- Uživatelská příručka

Specifikace produktu:

- Výkon: 3 Watt
- Spektrum: 660 nm a 850 nm
- Napětí: 12 V
- Hustota: 77,78 mW/cm²
- Rozměry: 49 × 32 cm
- Pracovní plocha: 46 × 29 cm

Vyjměte psí podložku a samostatné spojovací pásky z obalu.

Při používání podložky vždy berte v úvahu chování zvířete. Nechte zvíře, aby se s podložkou nejprve seznámilo, než ji nasadíte. Nejprve očistěte ošetřovanou oblast. Voda a nečistoty jsou pro podložku velmi škodlivé a mohou extrémně zkrátit její životnost.

Umístěte vnitřní stranu, kde se nachází světelný paprsek, na povrch těla v místě, kde je to potřeba.

Pokud to pes dovolí, můžete podložku připevnit k tělu pomocí spojovacího pásku. U velkého psa použijte nejdelší pásek. U malého psa lze použít malý pásek.

Pokud je podložka správně upevněna, lze na podložku umístit samostatnou baterii, která je na zadní straně opatřena suchým zipem. Díky suchému zipu si můžete sami zvolit nejvhodnější místo pro upevnění baterie.


Pokud je baterie správně upevněna, můžete ji připojit k bateriovému kabelu, který je připevněn k podložce. Poté můžete baterii zapnout a nastavit požadovaný čas. (Viz instrukce v části Nastavení baterie)

Je sezení u konce? Nejprve odpojte kabely. Poté opatrně vyjměte baterii (pozor, zvíře se může tohoto zvuku leknot, zejména pokud je velmi uvolněné). Po vyjmutí baterie odstraňte celou podložku.

Podložku s baterií vždy pečlivě uskladněte, nikdy ji však (pevně) nesvíjejte ani neskládejte. Podložka a baterie zůstávají kvůli světelnému paprsku křehkými produkty. Dbejte na to, aby podložka nebyla skladována vlhká nebo znečištěná.

Nastavení baterie

Na displeji baterie se zobrazuje doba terapie, intenzita terapie, kapacita baterie a indikace nabíjení.

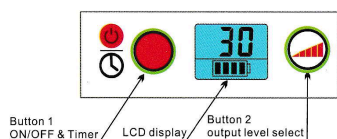

Button 1: Zapnutí/vypnutí a volba doby terapie

Pro zapnutí baterie podržte tlačítko 1 po dobu 1–2 sekund. Vestavěné hodiny se spustí, na LCD displeji uvidíte zbývající dobu terapie a kapacitu baterie.

Pro volbu doby terapie krátce stiskněte tlačítko 1, LCD displej zobrazí čas zvolený uživatelem. Naše doporučení je 15 minut na jedno ošetření.

Po 2 sekundách se LCD displej vrátí k zobrazení zbývající doby terapie a kapacity baterie.

„L4“ znamená 100 % intenzity

„L3“ znamená 75 % intenzity


„L2“ znamená 50 % intenzity



„L1“ znamená 25 % intenzity

Naše doporučení je používat 100% intenzitu, pokud zvíře jasně nedává najevo, že je mu to nepříjemné. Může se stát, že tělo je tak zaměstnáno regenerací, že se zdá teplejší, než podložka ve skutečnosti je; v takovém případě můžete intenzitu snížit. Jakmile proces hojení dále postupuje, můžete intenzitu opět zvýšit.

Po 2 sekundách se LCD displej vrátí k zobrazení zbývající doby terapie a kapacity baterie.

Nabíjení

Kapacita baterie je uvedena na LCD displeji baterie. Symbol kapacity baterie  je vždy zobrazen při zapnutí.

Displej nabíjení: pokud je ovladač ve stavu nabíjení, symbol bliká . Jakmile je nabíjení dokončeno, symbol přestane blikat. 

Nabíjení lze provádět připojením nabíječky k nabíjecímu kabelu baterie. Nikdy nepoužívejte jinou nabíječku než tu, která je dodána se sadou. Pozor: nikdy nepřipojujte nabíječku přímo k podložce a nikdy nepoužívejte podložku/baterii během současného nabíjení.

Přebíání a zkrat

Pokud je napětí baterie během nabíjení > 12,6 V, aktivuje se ochrana proti přebíání. Baterie se přestane nabíjet a symbol baterie přestane blikat.

Pokud je napětí baterie během používání < 9,6 V, baterie se po několikanásobném bliknutí LCD displeje vypne.

Pokud by během používání došlo ke zkratu, baterie se okamžitě vypne, aby se zabránilo poškození zařízení.

Pro obecné použití

Podložku CellKick pro psy lze také úspěšně používat při kožních onemocněních, jizvách, hojení ran, natržených vazech, šlachách, lokální bolesti a podobně. Připevněte podložku na ošetřované místo po dobu 10 minut. Pro optimální výsledek provádějte toto ošetření 3x denně.